



ANLEITUNG FÜR SCHNELLE ANWENDUNG



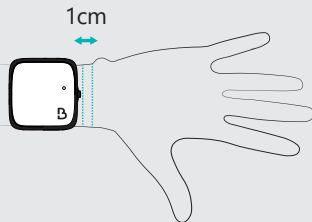

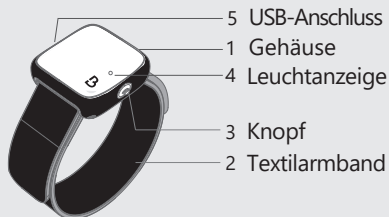

Das Bora band® BB100 muss gut angepasst werden, sodass es ohne Unbehagen leichten Druck auf Ihre Haut ausübt. Dies gewährleistet die Genauigkeit der Messwerte.

Bora band® starten oder seinen Betrieb überprüfen


Drücken Sie auf den Knopf: Die durchgehend ● grün leuchtende Leuchtbildschirm bedeutet, dass Bora band® in Betrieb ist.

> bewährte Praktiken

- Tragen Sie Ihr Bora band® **so oft wie möglich**, auch nachts.
- Nutzen Sie die Zeit der Körperpflege, um **Ihr Bora band® täglich zu laden**.
- Überprüfen Sie über die mobile Anwendung täglich, ob **Ihr Armband korrekt vernetzt ist**.

	Orange blinkend : Niedriger Akkustand, laden Sie Ihr Bora Band® BB100 mit dem mitgelieferten Ladekabel.
	Weiß blinkend : Der Akku lädt. Während dem Ladevorgang wird die Leuchtanzeige ausgeschaltet, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.
	Blau : Das Bora band® sendet oder empfängt Daten, schalten Sie es während diesem Vorgang nicht aus.
	Durchgehend rot : In Ihrem Bora band® BB100 ist ein Fehler aufgetreten. ▶ Schalten Sie es aus, und starten Sie es neu. ▶ Wenn der Fehler weiter besteht : Nehmen Sie mit der Struktur Kontakt auf, die Ihnen das Bora band® BB100 ausgeliefert hat.

Das Bora band® ausschalten

Drücken Sie solange auf den Knopf, bis die Leuchtanzeige  grün blinkt, was bedeutet, dass Ihr Bora band® BB100 ausgeschaltet wird.

Anmeldename :

Passwort:

Name und Nummer des Gesundheitsdienstleister :

Name des verschreibenden Arzt :

Hersteller :



BIOSENCY
13 rue Claude Chappe – Bât A
Oxygène
35510 Cesson Sévigné
France
www.biosency.com

Weitere Informationen
finden Sie in der
Gebrauchsanleitung des
Bora band®.

