



GUÍA RÁPIDA DE USO

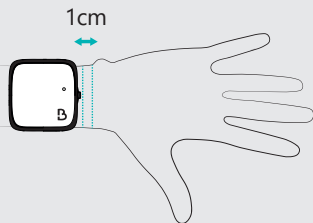

La Bora band® BB100 debe ajustarse bien y aplicar una ligera presión en la piel, sin llegar a ser incómoda. Esto garantiza la precisión de las medidas.

Para encender o comprobar el funcionamiento de la Bora band®

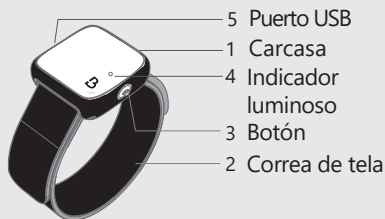



Pulse el botón: el indicador luminoso fijo en verde ● significa que la Bora band® está funcionando.

> Buenas prácticas


- Póngase la Bora band® **el mayor tiempo posible**, incluso por la noche.
- Mientras se asee, aproveche para **cargar su Bora band® diariamente**.
- Gracias a la aplicación móvil, compruebe diariamente que **su pulsera está bien conectada**.

Pulsera conectada con pulsioxímetro y sensor de frecuencia cardíaca y respiratoria

CE 2797

	Naranja parpadeando: tiene poca batería, cargue su Bora Band® BB100 con el cargador proporcionado.
	Blanco parpadeando: la batería está cargando. Durante a carga, o indicador apaga-se depois de a bateria estar completamente carregada.
	Azul: Bora band® envía o recibe datos, no la apague durante la operación.
	Rojo fijo: Bora band® BB100 tiene un fallo. <ul style="list-style-type: none">▶ Intente apagarla y luego, vuelva a encenderla.▶ Si sigue habiendo un fallo, contacte con la estructura que le ha proporcionado la Bora band® BB100.

Para apagar Bora band®

Pulse el botón hasta que el indicador luminoso en verde  parpadee, indicando que su Bora band® BB100 se apagará.

Identificador :

Contraseña:

Nombre y número del proveedor:

Nombre del médico que prescribe:

Fabricante :



BIOSENCY
13 rue Claude Chappe – Bât A
Oxygène
35510 Cesson Sévigné
France
www.biosency.com

Para más información,
consulte el manual de uso
de Bora band®.

