



## ISTRUZIONI RAPIDE PER L'USO



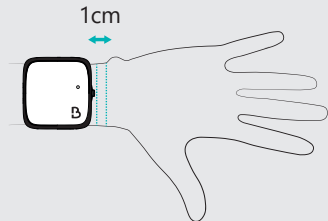

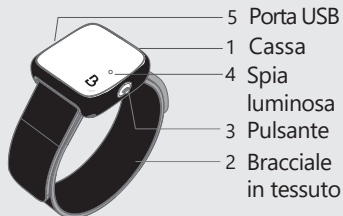

Il Bora band® BB100 deve essere regolato, in modo che eserciti una leggera pressione sulla pelle, ma senza causare disagio. Così la precisione delle misurazioni è garantita.

### Per avviare o verificare il funzionamento del Bora band®


Premere il pulsante: la spia luminosa ● verde indica che il Bora band® è in funzione.

#### > Procedure corrette

- Indossare il Boraband® **con la massima assiduità possibile**, anche di notte
- Approfittare del tempo dedicato alla cura della persona **per ricaricare il Bora band® ogni giorno.**
- Con l'applicazione mobile, verificare ogni giorno che **il bracciale sia correttamente connesso.**

	Arancione lampeggiante: la batteria è quasi scarica, ricaricare il Bora band® BB100 con l'apposito caricabatterie.
	Bianca lampeggiante: la batteria si sta ricaricano. In fase di ricarica, la spia si spegne quando la batteria è completamente ricaricata.
	Blu: il Bora band® invia o riceve dati, non spegnere durante l'operazione.
	Rossa fissa: il Bora band® BB100 non funziona correttamente. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Provare a spegnerlo e a riaccenderlo.</li><li>▶ Se il problema persiste: contattare la struttura che ha fornito il Bora band® BB100.</li></ul>

## Come si spegne il Boraband®

Premere il pulsante fino quando non lampeggia la  spia verde, per indicare che il Bora band® BB100 si sta spegnendo.

Nome utente: .....

Password: .....

Nome e codice del fornitore dei servizi sanitari: .....

Nome del medico prescrivente: .....

Produttore :



**BIOSENCY**  
**13 rue Claude Chappe – Bât A**  
**Oxygène**  
35510 Cesson Sévigné  
France  
[www.biosency.com](http://www.biosency.com)

Per ulteriori informazioni,  
vedere il manuale d'uso  
del Boraband®.

