



## SNELLE GEBRUIKSAANWIJZING

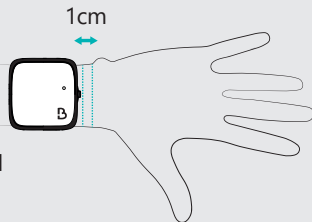

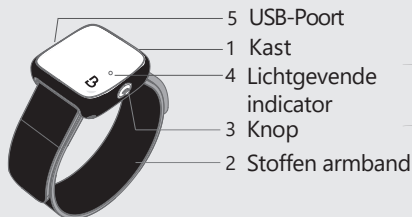

De Bora band® BB100 moet goed worden afgesteld en lichte druk uitoefenen op uw huid, zonder enig ongemak te voelen. Dit garandeert nauwkeurige metingen.

### Om te starten of het functioneren van de Bora band® te controleren


Druk op de knop: het groene lichtje ● geeft aan dat de Bora band® in werking is.

#### > Goede praktijken

- Draag uw Bora band® **zo vaak mogelijk**, ook 's nachts.
- Profiteer ervan om tijdens het wassen uw **Bora band® dagelijks op te laden**.
- Controleer elke dag via de mobiele applicatie of **uw armband goed is verbonden**.

	Oranje knippert: de batterij is bijna leeg, laadt uw Bora Band® BB100 op met behulp van de bijgeleverde oplader.
	Wit knippert: de batterij wordt opgeladen. Tijdens het opladen gaat het lichtje uit als de batterij volledig is opgeladen.
	Blauw: Bora band® stuurt of ontvangt gegevens, schakel hem tijdens dit proces niet uit.
	<b>Constant rood:</b> uw Bora band® BB100 functioneert niet <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Probeer hem uit te zetten en opnieuw te starten</li><li>▶ Als het nog niet functioneert: neem contact op met de structuur die de Bora band® BB100 geleverd heeft.</li></ul>

## Om de Bora band® te stoppen

Druk op de knop totdat het groene lichtje gaat knipperen  groen knippert, dit geeft aan dat uw Bora band® BB100 uitgaat.

Gebruikersnaam: .....

Wachtwoord: .....

Naam en nummer van de aanbieder : .....

Naam van de voorschrijvende arts: .....

Fabrikant:



**BIOSENCY**  
13 rue Claude Chappe – Bât A  
**Oxygène**  
35510 Cesson Sévigné  
Frankrijk  
[www.biosency.com](http://www.biosency.com)

Voor meer informatie kunt u de gebruiksaanwijzing van de Boraband® raadplegen.

