



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO RÁPIDA

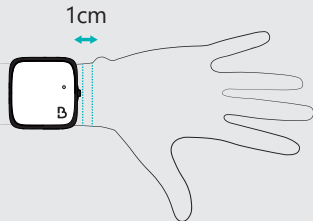

A Bora band® BB100 deve ser devidamente ajustada e aplicar uma ligeira pressão sobre a sua pele, sem sentir desconforto. Garante, assim, a exatidão das medições.

Para iniciar ou verificar o funcionamento da Bora band®

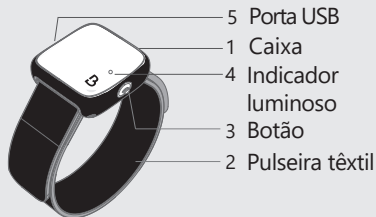



Prima o botão: o indicador luminoso ● verde fixo significa que a Bora band® está em funcionamento.

> Boas práticas

- Use a sua Bora band® **com a maior frequência possível**, incluindo durante a noite
- Desfrute do momento da higiene para **recarregar a sua Bora band® diariamente**.
- Graças à aplicação móvel, verifique diariamente que a sua **pulseira está devidamente ligada**.

Pulseira conectada Oxímetro e sensor de frequência cardíaca e respiratória



	Laranja intermitente: a bateria está fraca, recarregue a sua Bora Band® BB100 com a ajuda do carregador fornecido.
	Branco intermitente: a bateria está a carregar. Durante a carga, o indicador apaga-se depois de a bateria estar completamente carregada.
	Azul: A Bora band® está a enviar ou receber dados, não desligue durante a operação.
	Vermelho fixo: a sua Bora band® BB100 apresenta uma anomalia <ul style="list-style-type: none">▶ Tente desligar e voltar a ligar▶ Se a anomalia persistir: contacte a estrutura que lhe forneceu a Bora band® BB100.

Para parar a Bora band®

Prima o botão até que o indicador luminoso  verde pisque, indicando que a sua Bora band® BB100 se desligou.

Utilizador:

Palavra-passe:

Nome e número do fornecedor:

Nom do médico prescriptor:

Fabricante :



BIOSENCY
13 rue Claude Chappe – Bât A
Oxygène
35510 Cesson Sévigné
France
www.biosency.com

Para mais informações,
consulte o manual de
utilização da Bora band®.

