


Guide d'utilisation rapide

Afin de vous accompagner lors de votre retour à domicile, un télésuivi de vos paramètres cardio-respiratoires a été mis en place.

Dans le cadre de ce télésuivi, vous avez été doté d'un **bracelet connecté BORA Band BB-100**, ainsi que d'une **BORA Box exécutant l'application mobile BORA Connect for Home**. Ce document présente le fonctionnement de ces dispositifs ainsi que des conseils pour une utilisation optimale.

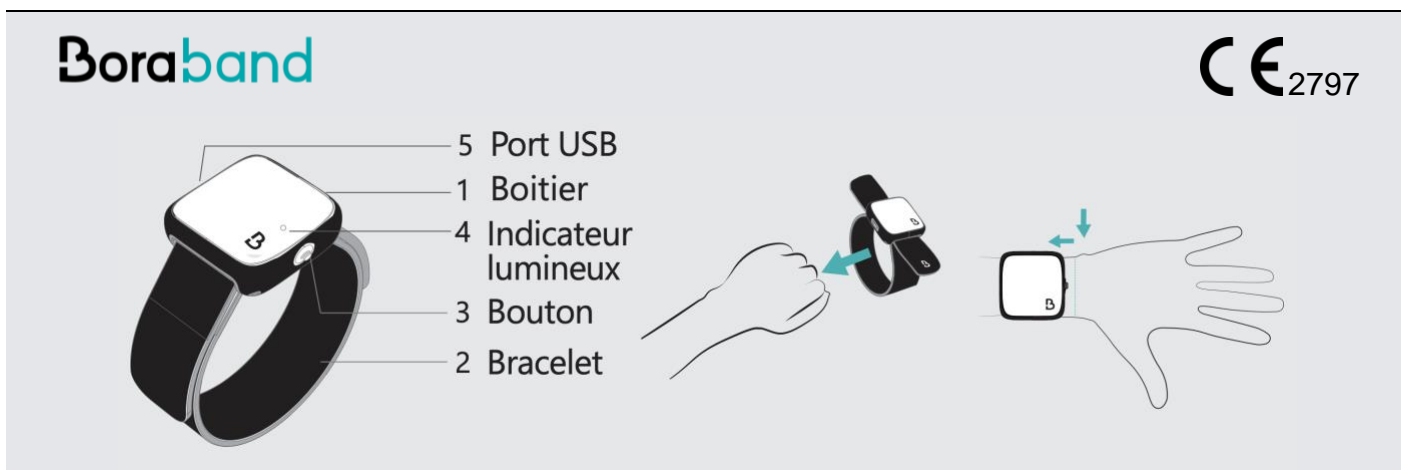

Conseils de port du bracelet

Le BORA Band BB-100 doit être **bien ajusté sur votre poignet** afin de garantir la précision de mesure, sans que vous ne ressentiez d'inconfort. Il doit être porté en permanence, mais doit être enlevé pour la toilette, moment pendant lequel nous vous conseillons de le mettre en charge.

Démarrage

Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde. L'indicateur lumineux ● est **fixe pendant 5 secondes** et vous indique que votre BORA Band BB100 est en fonction.

Vérification du bon fonctionnement du BORA Band

Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde. L'indicateur lumineux ● est **fixe pendant 5 secondes** et vous indique que votre BORA Band BB100 est en fonction.





Arrêt

Pour arrêter, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'indicateur ☀️ clignote pendant 5 secondes et vous indique que votre BORA Band BB100 s'arrête.

Recharge

Utilisez le **chargeur fourni par Biosency** pour recharger votre BORA Band. Nous vous conseillons de le **recharger lorsque vous le retirez pour la toilette**. Pensez à le remettre une fois chargé.

Autres indicateurs lumineux

	Orange clignotant : la batterie est faible, rechargez votre BORA Band BB100 à l'aide du chargeur fourni.		Bleu : BORA Band envoie ou reçoit des données, veuillez ne pas éteindre pendant l'opération.
	Blanc clignotant : la batterie est en charge. Lors de la charge, l'indicateur s'éteint une fois la batterie complètement chargée.		Rouge fixe : votre BORA Band BB100 est en défaut. Essayez de l'éteindre et le démarrer à nouveau. Si toujours en défaut : contactez votre prestataire.

BORA Box

BORA Box est constitué d'un smartphone doté de l'application mobile « **Bora Connect For Home** » chargée de **transmettre les données** de votre BORA Band à la plateforme BORA Connect.


Conseils d'utilisation généraux

Laissez la **BORA Box branchée sur son chargeur** en permanence dans une pièce de vie.

Le téléphone doit être allumé (bouton du bas à droite).

Communication avec BORA Band

La BORA Box se connecte automatiquement à votre BORA Band lorsque celui-ci est allumé et à proximité. Dans l'application BORA Connect For Home, vous pouvez observer l'écran ci-contre, qui vous indique l'**identifiant** (ou numéro de série) de votre BORA Band, son **niveau de batterie**, et la **date de dernière transmission** des données.

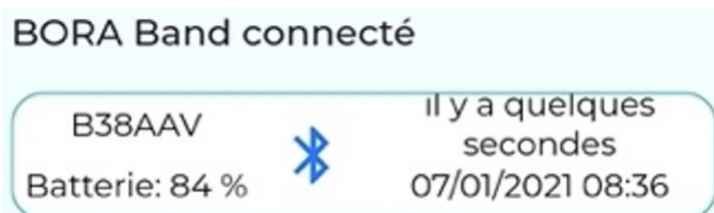

Si vous n'observez pas cet écran, attendez jusqu'à 10 minutes. S'il n'apparaît pas au bout de ces 10 minutes, reportez-vous à la section « **En cas de problème de transmission** ».

En cas de problème de transmission

Si votre application ne se connecte pas à votre BORA Band, effectuez les opérations suivantes :

1. Assurez-vous que votre BORA Band est bien en marche en vous reportant à la section « **Vérification du bon fonctionnement du BORA Band** » au recto de ce guide. Si cela ne résout pas le problème, passez à l'étape suivante.
2. Assurez-vous que votre BORA Band est suffisamment proche de votre BORA Box. Si cela ne résout pas le problème, contactez votre prestataire.

Si l'indicateur lumineux vous incommodé durant la nuit

S'il est orange (batterie faible) : branchez votre BORA Band plus régulièrement. A titre d'exemple, nous vous suggérons de mettre votre bracelet BORA Band à charger pendant votre toilette.

S'il est bleu (transmission de données) : vous pouvez éloigner votre BORA Box de votre chambre afin de limiter la transmission des données la nuit.

Pour plus de détails, consultez les manuels de BORA Band et BORA Connect for Home sur <https://biosency.com/ifu/>