




GUÍA RÁPIDA DE USO




CE 2797

Dispositivo conectado con oxímetro &
sensor de frecuencia cardíaca y respiratoria

Descripción y colocación del dispositivo Bora band® en el brazo o la muñeca

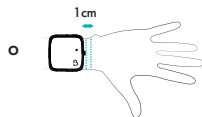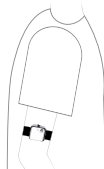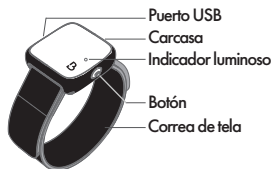

El dispositivo Bora band® BB100 debe ajustarse bien y aplicar una ligera presión en la piel, sin llegar a ser incómoda. Esto garantiza la precisión de las medidas.

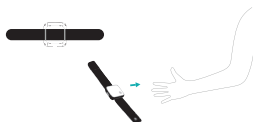

Buenas prácticas

- Póngase el dispositivo Bora band® **el mayor tiempo posible**, incluso por la noche.
- Mientras se asee, aproveche para **cargar su dispositivo Bora band® diariamente**.
- El dispositivo Bora band® solo es resistente a las salpicaduras de agua en todas direcciones (IP64) se recomienda **quitarlo durante el tiempo del aseo** o durante actividades acuáticas como la **natación**.
- Para garantizar un funcionamiento correcto y evitar cualquier problema de transmisión de datos, le recomendamos que **no apague nunca el dispositivo Bora band®, cuando una sesión de teleseguimiento esté en curso**.

Gracias a la aplicación móvil, compruebe diariamente que **su dispositivo está bien conectado** para consultar sus datos.

Para encender o comprobar el funcionamiento del dispositivo Bora band®

Pulse rápidamente el botón : el indicador luminoso parpadea  en verde mientras se enciende el dispositivo Bora band®.

Apretar rápidamente el botón tras el encendido permite ver una luz verde fija que indica que el dispositivo Bora band® está en funcionamiento. 

Para apagar el dispositivo Bora band®

Pulse el botón hasta que aparezca la luz naranja  lo que indica el apagado de su dispositivo Bora band® BB100.

Otras indicaciones luminosas

	Naranja parpadeante: tiene poca batería, cargue su dispositivo Bora Band® BB100 con el cargador proporcionado*.
	Blanco parpadeante: la batería se está cargando. El indicador se apaga cuando la batería está completamente cargada.
	Azul fijo: El dispositivo Bora band® está instalando una actualización de software, enviando o recibiendo datos. No lo apague durante esta operación.
	Rojo fijo: El dispositivo Bora band® BB100 tiene un fallo. ▶ Intente apagarlo y luego, vuelva a encenderlo. ▶ Si sigue habiendo un fallo, contacte con la estructura que le ha proporcionado el dispositivo Bora band® BB100.

*La luz indicadora no se enciende por la noche entre las 20:00 UTC y las 6:00 UTC.

Para más información, consulte el manual de uso del dispositivo Bora band®.



Fabricante :



BIOSENCY
13 rue Claude Chappe Bât A Oxygène
35510 Cesson Sévigné, France
www.biosency.com