
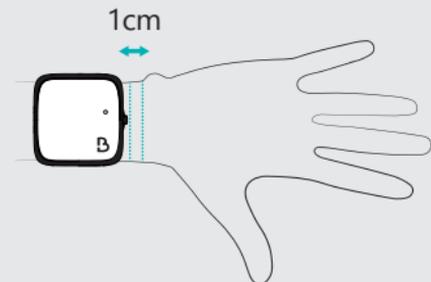


NOTICE D'UTILISATION RAPIDE

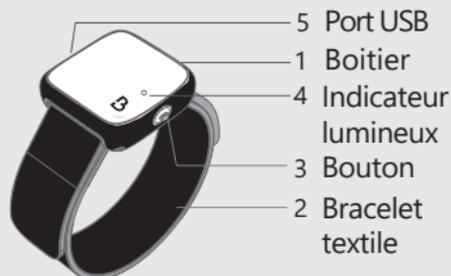

Le Bora band® BB100 doit être bien ajusté et appliquer une légère pression sur votre peau, sans ressentir d'inconfort. Ceci garantit, la précision des mesures.

Pour démarrer ou vérifier le fonctionnement du Boraband®

Appuyez sur le bouton : l'indicateur lumineux ● vert fixe signifie que le Bora band® est en fonctionnement.

> Bonnes pratiques

- Portez votre Bora band® **le plus souvent possible**, y compris la nuit.
- Profitez de la toilette pour **recharger votre Bora band® quotidiennement**.
- Grâce à l'application mobile, vérifiez quotidiennement que votre **bracelet s'est bien connecté**.

Bracelet connecté Oxymètre & capteur
de fréquence cardiaque et respiratoire.

CE 2797

	Orange clignotant : la batterie est faible, rechargez votre Bora band® BB100 à l'aide du chargeur fourni.
	Blanc clignotant: la batterie est en charge. Lors de la charge, l'indicateur s'éteint une fois la batterie complètement chargée.
	Bleu: Bora band® envoie ou reçoit des données, veuillez ne pas éteindre pendant l'opération.
	Rouge fixe : votre Bora band® BB100 est en défaut. <ul style="list-style-type: none">▶ Essayez de l'éteindre puis de le démarrer à nouveau.▶ Si toujours en défaut : contactez la structure qui vous a fourni le Boraband® BB100.

Pour arrêter le Boraband®

Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'indicateur lumineux  vert clignote, indiquant que votre Bora band® BB100 s'éteint.

Identifiant :

Mot de passe:

Nom et numéro du prestataire :

Nom du médecin prescripteur :

Fabricant :



BIOSENCY
13 rue Claude Chappe – Bât A
Oxygène
35510 Cesson Sévigné
France
www.biosency.com

Pour plus d'informations,
veuillez vous référer au
manuel d'utilisation du
Bora band®.

