




# NOTICE D'UTILISATION RAPIDE




CE 2797

Dispositif connecté Oxymètre & capteur  
de fréquence cardiaque et respiratoire

## Description et positionnement du dispositif Bora band® au bras ou au poignet

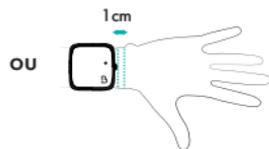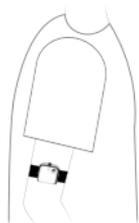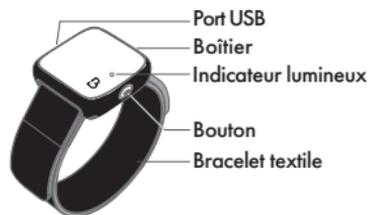

Le dispositif Bora band® BB100 doit être bien ajusté et appliquer une légère pression sur votre peau, sans ressentir d'inconfort. Cela garantit la précision des mesures.

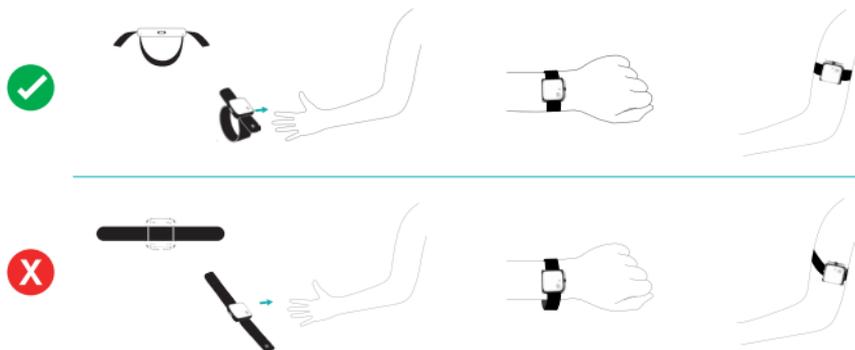

### Bonnes pratiques

- Portez votre dispositif Bora band® **le plus souvent possible**, y compris la nuit.
- Profitez de la toilette pour **recharger votre dispositif Bora band® quotidiennement**.
- Le dispositif Bora band® n'est résistant qu'aux projections d'eau dans toutes les directions (IP64), il est conseillé de le **retirer le temps de la toilette** ou lors d'activités nautiques comme la **natation**.
- Pour garantir le fonctionnement correct et éviter tout problème de transmission des données, il est recommandé de ne **jamais éteindre le dispositif Bora band® lorsqu'une session de télésurveillance est en cours**.

Grâce à l'application mobile, vérifiez quotidiennement que **votre dispositif s'est bien connecté** pour remonter vos données.

### Pour démarrer ou vérifier le fonctionnement du dispositif Bora band®

Appuyez rapidement sur le bouton : l'indicateur lumineux clignote  vert pendant l'allumage du dispositif Bora band®.

Appuyer rapidement sur le bouton après l'allumage permet de visualiser un indicateur lumineux fixe vert  qui signifie que le dispositif Bora band® est en fonctionnement.

### Pour arrêter le dispositif Bora band®

Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'indicateur lumineux orange  apparaisse, indiquant que votre dispositif Bora band® BB 100 s'éteint.

### Autres indications lumineuses

	Orange clignotant : la batterie est faible, rechargez votre dispositif Bora band® BB100 à l'aide du chargeur fourni*.
	Blanc clignotant : la batterie est en charge. L'indicateur s'éteint une fois la batterie complètement chargée.
	Bleu fixe : le dispositif Bora band® installe une mise à jour logicielle, envoi ou reçoit des données, veuillez ne pas éteindre pendant l'opération*.
	Rouge fixe : votre dispositif Bora band® BB100 est en défaut. ▶ Essayez de l'éteindre puis de le démarrer à nouveau. ▶ Si toujours en défaut : contactez la structure qui vous a fourni le dispositif Bora band® BB100.

\*L'indicateur lumineux ne s'allume pas la nuit entre 20h00 UTC et 6h00 UTC.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du dispositif Bora band®.



**Fabricant :**



BIOSENCY  
13 rue Claude Chappe Bât A Oxygène  
35510 Cesson Sévigné, France  
[www.biosency.com](http://www.biosency.com)