


Guide d'utilisation rapide

Afin de vous accompagner lors de votre retour à domicile, un télésuivi de vos paramètres cardio-respiratoires a été mis en place.

Dans le cadre de ce télésuivi, vous avez été doté d'un **bracelet connecté BORA Band BB-100**, ainsi que d'un téléphone portable exécutant **l'application mobile BORA Connect for Home**. Ce document présente le fonctionnement de ces deux dispositifs ainsi que des conseils pour une utilisation optimale.

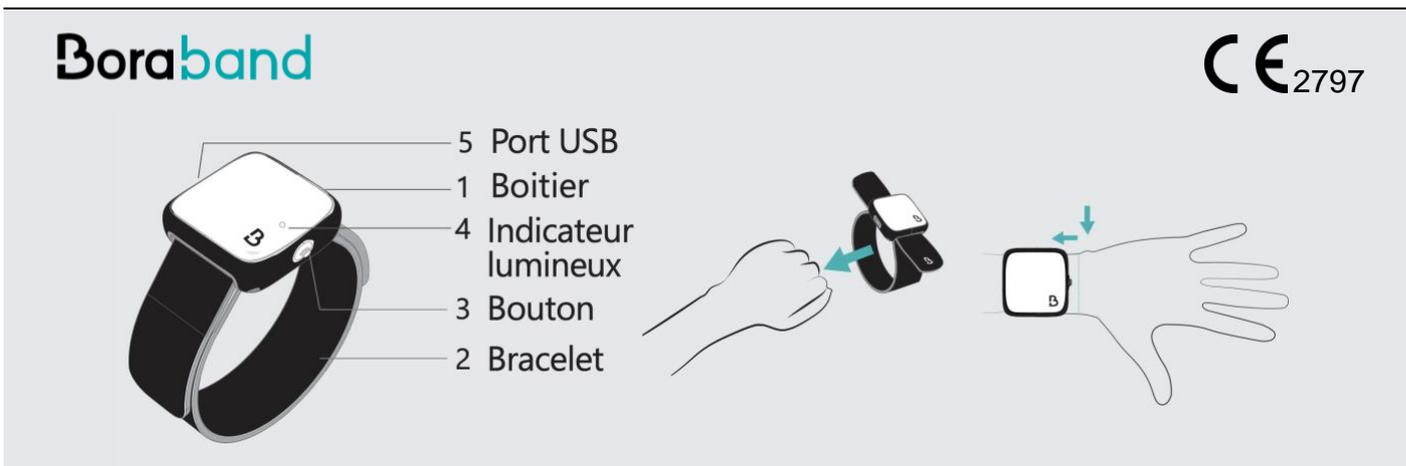

Conseils de port du bracelet

Le BORA Band BB-100 doit être **bien ajusté sur votre poignet** afin de garantir la précision de mesure, sans que vous ne ressentiez d'inconfort. Il doit être porté en permanence, mais doit être enlevé pour la toilette, moment pendant lequel nous vous conseillons de le mettre en charge.

Démarrage

Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde. L'indicateur lumineux ● est **fixe pendant 5 secondes** et vous indique que votre BORA Band BB100 est en fonction.

Vérification du bon fonctionnement du BORA Band

Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde. L'indicateur lumineux ● est **fixe pendant 5 secondes** et vous indique que votre BORA Band BB100 est en fonction.

Arrêt

Pour arrêter, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que l'indicateur ● clignote pendant 5 secondes et vous indique que votre BORA Band BB100 s'arrête.

Recharge

Utilisez le **chargeur fourni par Biosency** pour recharger votre BORA Band. Nous vous conseillons de le **recharger lorsque vous le retirez pour la toilette**. Pensez à le remettre une fois chargé.

Autres indicateurs lumineux

	Orange clignotant : la batterie est faible, rechargez votre BORA Band BB100 à l'aide du chargeur fourni.		Bleu : BORA Band envoie ou reçoit des données, veuillez ne pas éteindre pendant l'opération.
	Blanc clignotant : la batterie est en charge. Lors de la charge, l'indicateur s'éteint une fois la batterie complètement chargée.		Rouge fixe : votre BORA Band BB100 est en défaut. Essayez de l'éteindre et le démarrer à nouveau. Si toujours en défaut : contactez votre prestataire.


BORA Connect for Home est l'application mobile chargée de **transmettre les données** de votre BORA Band.

Conseils d'utilisation généraux

- › Laissez le **téléphone fourni branché sur son chargeur** en permanence
- › Lancez l'application et **laissez-la démarrée et au premier plan** en permanence
- › **Tous les jours**, consultez l'application et vérifiez si votre BORA Band est bien connecté, **transmet des données** régulièrement, et s'il est nécessaire de le recharger.

Communication avec BORA Band

L'application se connecte automatiquement à votre BORA Band lorsque celui-ci est allumé et à proximité. Lorsque vous consultez l'application, vérifiez que vous observez bien l'écran ci-contre, qui vous indique **l'identifiant** (ou numéro de série) de votre BORA Band, son **niveau de batterie**, et la **date de dernière transmission** des données.

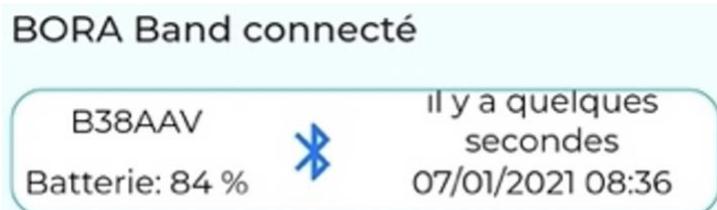

Si vous n'observez pas cet écran, attendez jusqu'à 10 minutes. S'il n'apparaît pas au bout de ces 10 minutes, reportez-vous à la section « **En cas de problème de transmission** ».

En cas de problème de transmission

Si votre application ne se connecte pas à votre BORA Band, effectuez les opérations suivantes :

1. Assurez-vous que votre BORA Band est bien en marche en vous reportant à la section « **Vérification du bon fonctionnement du BORA Band** » au recto de ce guide. Si cela ne résout pas le problème, passez à l'étape suivante.
2. Assurez-vous que votre téléphone a bien accès à Internet, et que votre BORA Band est suffisamment proche de votre téléphone. Si cela ne résout pas le problème, passez à l'étape suivante.
3. Redémarrez votre application BORA Connect for Home, puis attendez quelques minutes. Si cela ne résout pas le problème, passez à l'étape suivante.
4. Éteignez votre BORA Band, puis redémarrez-le. Si cela ne résout pas le problème, passez à l'étape suivante.
5. Si aucune de ces opérations n'a résolu le problème, contactez votre prestataire.

Si l'indicateur lumineux vous incommodé durant la nuit

S'il est orange (batterie faible) : branchez votre BORA Band plus régulièrement. Vous pouvez vérifier son niveau de batterie dans l'application BORA Connect for Home.

S'il est bleu (transmission de données) : vous pouvez mettre le téléphone en veille en cliquant sur le bouton du téléphone dédié (à droite du téléphone). N'oubliez pas de réactiver le téléphone à votre réveil.

Pour plus de détails, consultez les manuels de BORA Band et BORA Connect for Home sur

<https://biosency.com/ifu/>