


## NOTICE D'UTILISATION RAPIDE

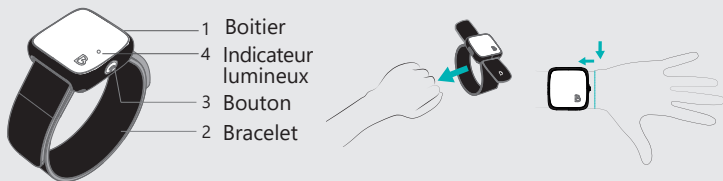

Le BB100 doit être bien ajusté sur votre poignet afin de garantir la précision de mesure, sans ressentir d'inconfort.

### > Démarrage

Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes. L'indicateur lumineux ● est fixe pendant 5 secondes et vous indique que votre BB100 est en fonction.

### > Vérification du bon fonctionnement





Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde. L'indicateur lumineux ● est fixe pendant 5 secondes et vous confirme le bon fonctionnement.

### > Transmission de données

Pendant la transmission sécurisée de vos données à l'application BORA Connect, l'indicateur lumineux 🌟 clignote. **N'appuyez pas sur le bouton.**

### > Arrêt

Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes. L'indicateur 🌟 clignote pendant 5 secondes et vous indique que votre BB100 s'arrête.

	Orange clignotant : la batterie est faible, rechargez votre BB100 à l'aide du chargeur fourni.
	Blanc clignotant : La batterie est en charge
	Bleu fixe : une mise à jour du logiciel de votre BB100 est en cours, veuillez ne pas éteindre pendant cette opération.
	Rouge fixe : votre BB100 est en défaut ▶ Essayez de l'éteindre et le démarrer à nouveau ▶ Si toujours en défaut : contactez votre prestataire de santé
Pas de lumière lors du chargement de la batterie : contactez le fabricant	

Fabricant :



**BIOSENCY**

1137 A Avenue des champs blancs

35510 Cesson Sevigné

France

[www.biosency.com](http://www.biosency.com)

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du BORA Band.

