
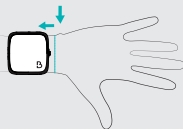


NOTICE D'UTILISATION RAPIDE

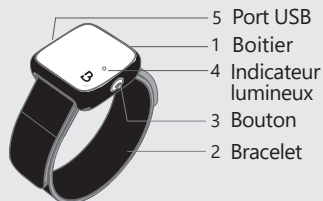

Le BORA Band BB100 doit être bien ajusté sur votre poignet afin de garantir la précision de mesure, sans ressentir d'inconfort.

> Démarrage

Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes. L'indicateur lumineux ● est fixe pendant 5 secondes et vous indique que votre BORA Band BB100 est en fonction.

> Vérification du bon fonctionnement

Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde. L'indicateur lumineux ● est fixe pendant 5 secondes et vous confirme le bon fonctionnement.

> Arrêt





Veillez-vous assurer que votre BORA Band a transmis les dernières données mesurées avant de l'éteindre.

Pour cela, assurez-vous que votre portable est connecté à internet, et que votre Boraband est proche de votre portable.

Ensuite, connectez-vous à votre compte BORA Connect et vérifiez que les dernières données apparaissent

Pour arrêter, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes. L'indicateur -●- clignote pendant 5 secondes et vous indique que votre BORA Band BB100 s'arrête.

BB100 : Oxymètre de pouls porté au poignet

	Orange clignotant : la batterie est faible, rechargez votre BORA Band BB100 à l'aide du chargeur fourni.
	Blanc clignotant : la batterie est en charge. Lors de la charge, l'indicateur s'éteint une fois la batterie complètement chargée.
	Bleu : BORA Band envoie ou reçoit des données, veuillez ne pas éteindre pendant l'opération.
	Rouge fixe : votre BORA Band BB100 est en défaut ▶ Essayez de l'éteindre et le démarrer à nouveau ▶ Si toujours en défaut : contactez la structure aux coordonnées ci-dessous.

Notes:

Pour plus d'informations, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du BORA Band.



Fabricant:



BIOSENCY

1137 A Avenue des champs blancs
35510 Cesson Sevigné
France
www.biosency.com