


GUIDE DE PRISE EN MAIN


Première connexion sur Bora connect ®

1. A l'ouverture de votre compte, vous recevez un mail contenant le lien pour la 1ère connexion. Pensez à vérifier vos spams.
2. En cliquant sur ce lien, **vous activez votre compte et définissez votre mot de passe.**
3. Après avoir défini votre mot de passe, vous serez redirigé vers la page de connexion de la plateforme web. **Entrez votre login (qui est votre adresse email), votre mot de passe nouvellement défini et validez.**
4. Lors de votre première connexion, vous devrez sélectionner le code de votre pays et saisir un numéro de téléphone mobile pour activer l'AMF (authentification à deux facteurs). Vous recevrez immédiatement un SMS contenant un code à usage unique.
5. Saisissez le code à usage unique reçu par SMS. Cette double authentification sera requise au moins une fois par semaine, ou lorsque vous vous déconnectez volontairement de Bora connect ®.
6. Vous recevrez sur la plateforme un code de récupération que vous pourrez utiliser au cas où vous auriez besoin de vous connecter sans votre appareil téléphonique. Ce code de récupération ne peut être utilisé qu'une seule fois. Veuillez le conserver dans un endroit sûr.
7. Dernière étape avant d'accéder à l'interface de Bora connect ®, votre consentement en ce qui concerne le traitement de vos données personnelles sur la plateforme Bora connect ® est requis.

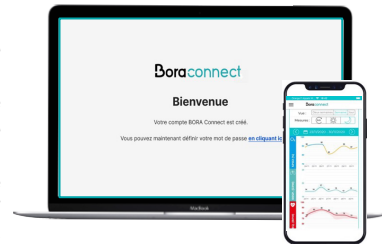

Attribuer un Bora band ® à un nouveau patient et débiter une session de télésurveillance

1. Créez le profil du patient sur la plateforme Bora connect ®. Cliquez sur le bouton **"Ajouter"** puis **remplir les informations** relatives au patient. Le patient recevra un mail de vérification et pourra configurer son compte.
2. **Assignez le bracelet Bora band ®** au patient depuis la plateforme Bora connect ®. Cliquez sur le bouton **+** à côté du nom du patient pour démarrer la télésurveillance.
3. Sélectionnez le dispositif de surveillance qui sera installé sur le patient et cliquez sur le bouton "Suivant".
4. Configurez des alertes sur les mesures du patient que vous souhaitez surveiller.
5. Vérifiez le dispositif sélectionné et la configuration des alertes et confirmez pour démarrer la télésurveillance du patient.

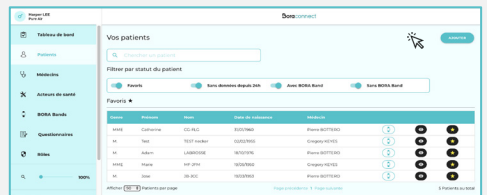

Consultez les données cliniques de vos patients en ligne

Les données remontées par le Bora band ® sont la saturation en oxygène, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la température cutanée, l'activité et le nombre de pas. Elles sont accessibles dans la rubrique «patient».

Nos algorithmes analysent en continu la qualité des signaux mesurés et affichent sur la plateforme uniquement les mesures dont nous garantissons la fiabilité.

A noter que les données sont chiffrées et hébergées chez un hébergeur certifié hébergeur de données de santé (HDS).




Système d'alerting / aide à la visualisation sur le tableau de bord : Comment ça marche ?

Il est possible de configurer des alertes personnalisées par patient afin d'identifier facilement ceux dont les signes vitaux sont en dehors des limites fixées.

2 types d'alertes peuvent être activées :

- Des **alertes techniques** non personnalisables
- Des **alertes cliniques** liées à la fréquence respiratoire, à la fréquence cardiaque et au niveau d'oxygène, personnalisables soit en fonction d'une **limite fixe** ou en fonction d'un **pourcentage de variation par rapport à la ligne de base du patient**

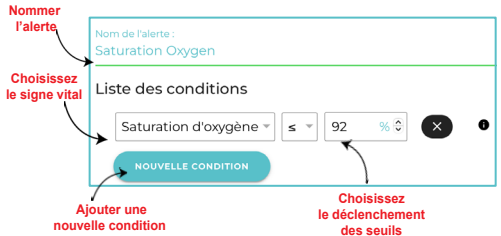

Ces alertes apparaissent dans le tableau de bord sous forme de symboles / voyants qui diffèrent en fonction des paramètres concernés :



L'alerte est liée à un problème technique :
Port du bracelet < 60% du temps, faible retour de données (<30 sur 48h glissantes), absence de connexion pendant 48h.




L'alerte est liée au niveau d'oxygène du patient.



L'alerte est liée à la fréquence cardiaque du patient.



L'alerte est liée à la fréquence respiratoire du patient.

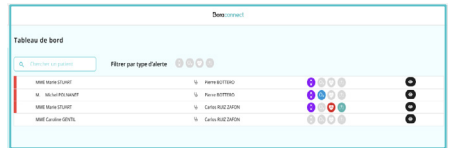

Vous pouvez venir clôturer ces alertes en cliquant sur la ligne du patient concerné puis sur le bouton **CLÔTURER**.
À noter qu'un commentaire est requis pour clôturer l'alerte.


CLÔTURER

Mettre fin à une session de télésurveillance avec un Bora band®

1. S'assurer que les dernières données ont été remontées sur la plateforme Bora connect®. Pour cela veillez à ce que le téléphone mobile du patient soit connecté à internet et qu'il soit proche de son Bora band®. Ensuite, assurez-vous que le patient soit connecté à Bora connect® et vérifiez que les dernières données apparaissent.
2. Arrêter la session de télésuivi du patient en cours en cliquant sur ce bouton :
3. Désinfecter le bracelet et ses accessoires.
4. Changer le bracelet textile.
5. Mettre à jour le statut du bracelet en attestant l'avoir désinfecté et avoir vérifié le boîtier sur la plateforme Bora connect®. Le Bora band® sera ensuite présent dans la liste des bracelets disponibles et pourra être attribué à un nouveau patient.

En tant qu'utilisateur, pour une meilleure expérience de la plateforme pensez à :

- Vous assurer en amont que les bora band® assignés aux patients ont bien été installés chez ces derniers.
- Sélectionner les patients qui le nécessitent en favoris .
- Paramétrer vos préférences personnelles pour l'affichage des mesures :
 - En choisissant un affichage standard ou avancé (boxplot) par exemple (bouton)
 - En sélectionnant les données cliniques que vous souhaitez affichées
 - En choisissant la période d'affichage souhaité (Mois / Semaine / Jour) ainsi que la vue (diurne / nocturne)
- Rafraîchir les données sur une page patient : glissez l'écran vers le bas sur l'application ou rafraichissez la page dans votre navigateur web.

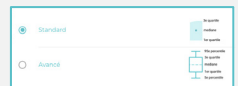

Le bracelet Bora band® et la plateforme Bora connect® sont certifiés DM de classe IIA.

Nos services sont à votre disposition :

Consultez notre site support <https://doc.bora-connect.com/manuals/bora-connect/>

Ou contactez notre service support : support@biosency.com - 0800 910 073