
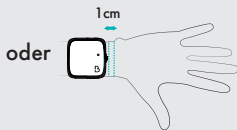
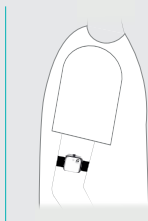


## ANLEITUNG FÜR SCHNELLE ANWENDUNG

### Beschreibung und Positionierung des Bora band® am Arm oder am Handgelenk

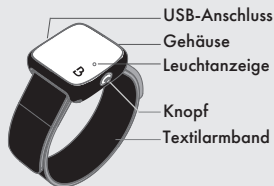


Das Bora band® BB100 muss gut angepasst werden, sodass es ohne Unbehagen leichten Druck auf Ihre Haut ausübt. Dies gewährleistet die Genauigkeit der Messwerte.


### Bewährte Praktiken

- Tragen Sie Ihr Bora band® **so oft wie möglich**, auch nachts.
- Nutzen Sie die Zeit der Körperpflege, um **Ihr Bora band® täglich zu laden**.
- Das Bora band® ist nur gegen Spritzwasser aus allen Richtungen beständig (IP64), daher ist es ratsam, **es während des Toilettengangs** oder bei Wassersportarten wie Schwimmen **abzunehmen**.


Mithilfe der mobilen App können Sie täglich überprüfen, ob Ihr Gerät eine Verbindung hergestellt hat, um Ihre Daten zu übermitteln.

## Bora band® starten oder seinen Betrieb überprüfen





Drücken Sie kurz den Knopf: Während des Einschaltens des Bora band® blinkt die Leuchtanzeige grün. 

Wenn Sie nach dem Einschalten kurz den Knopf drücken, zeigt das durchgehende Aufleuchten einer grünen Leuchtanzeige  dass das Bora band® in Betrieb ist.

## Das Bora band® ausschalten

Drücken Sie den Knopf, bis die orangefarbene Leuchtanzeige erscheint und damit anzeigt  dass Ihr Bora band® BB100 ausgeschaltet wird.

## Weitere Leuchtanzeigen

	Orange blinkend : Niedriger Akkustand, laden Sie Ihr Bora Band® BB100 mit dem mitgelieferten Ladekabel.
	Weiß blinkend : Der Akku lädt. Während dem Ladevorgang wird die Leuchtanzeige ausgeschaltet, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.
	Durchgehend blau : Bora band® installiert ein Software-Update, sendet oder empfängt Daten. Schalten Sie das Gerät während dieses Vorgangs bitte nicht aus.
	Durchgehend rot : In Ihrem Bora band® BB100 ist ein Fehler aufgetreten. ▶ Schalten Sie es aus, und starten Sie es neu. ▶ Wenn der Fehler weiter besteht : Nehmen Sie mit der Struktur Kontakt auf, die Ihnen das Bora band® BB100 ausgeliefert hat.

Hersteller :



BIOSENCY  
13 rue Claude Chappe Bât A Oxygène  
35510 Cesson Sévigné, France  
[www.biosency.com](http://www.biosency.com)

Weitere Informationen finden Sie  
in der Gebrauchsanleitung des  
Bora band®.



AUGUST 2024

Version 6.0-DE