


## SNELLE GEBRUIKSAANWIJZING

### Beschrijving en plaatsing van de Bora band® op de arm of pols

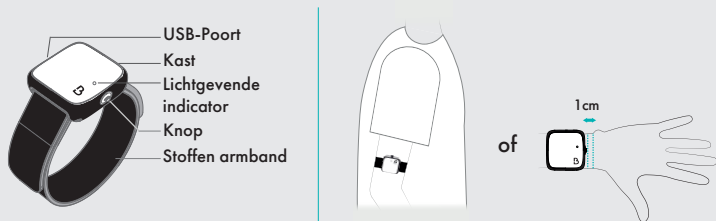


De Bora band® BB100 moet goed worden afgesteld en lichte druk uitoefenen op uw huid, zonder enig ongemak te voelen. Dit garandeert nauwkeurige metingen.


### Goede praktijken

- Draag uw Bora band® **zo vaak mogelijk**, ook 's nachts.
- Profiteer ervan om tijdens het wassen uw **Bora band® dagelijks op te laden**.
- De Bora band® is alleen bestand tegen spatwater in alle richtingen (IP64), dus het is raadzaam om **hem af te doen bij het afwassen** of tijdens wateractiviteiten zoals **zwemmen**.


Gebruik de mobiele applicatie om elke dag **te controleren of je apparaat goed is aangesloten om je gegevens terug te sturen.**

## Om te starten of het functioneren van de Bora band® te controleren


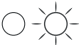


Druk snel op de knop : het indicatielampje knippert groen  tijdens inschakeling van de Bora band®.

Wanneer de knop snel wordt ingedrukt na het inschakelen, blijft het indicatorlampje groen branden  dit betekent dat de Bora band® in werking is.

## De Bora band® stoppen

Druk op de knop totdat het oranje indicatielampje verschijnt  dit betekent dat de Bora band® BB100 uitschakelt.

## Andere indicatorlampjes

|   |  |
|---|--|
|   | Oranje knippert : de batterij is bijna leeg, laadt uw Bora Band® BB100 op met behulp van de bijgeleverde oplader.  |
|   | Wit knippert : de batterij wordt opgeladen.<br>Tijdens het opladen gaat het lichtje uit als de batterij volledig is opgeladen.   |
|  | Constant blauw : Bora band® installeert een software update, verstuurt of ontvangt data, niet uitschakelen tijdens deze operatie.  |
|  | Constant rood: uw Bora band® BB100 functioneert niet.<br>▶ Probeer hem uit te zetten en opnieuw te starten.<br>▶ Als het nog niet functioneert: neem contact op met de structuur die de Bora band® BB100 geleverd heeft. |

Fabrikant :



BIOSENCY

13 rue Claude Chappe Bât A Oxygène  
35510 Cesson Sévigné, France  
[www.biosency.com](http://www.biosency.com)

Voor meer informatie kunt u de  
gebruiksaanwijzing van de  
Bora band® raadplegen.



Versie 6.0-NL

AUGUSTUS 2024