

BIOSENCY

Caring anytime, anywhere



CE 2797

Bora NGD Firmware (Network Gateway Device)

Sommario

Introduzione	3
Informazioni su questo manuale	3
Uso previsto	3
Accensione del terminale	4
Codice colore delle spie	5
Sicurezza informatica	6
Rischio informatico	6
Connessione internet	6
Etichettatura e simboli	7
Informazioni di contatto del fabbricante	8

Introduzione

Informazioni su questo manuale

Il presente manuale costituisce la guida per l'uso del terminale di feedback dati fornito da Biosency. Bora NGD Firmware si riferisce al software integrato nel terminale di feedback dati. Solo il software è un dispositivo medico.

Il terminale deve essere utilizzato solo con gli accessori forniti da Biosency. Per ulteriori informazioni sul terminale di feedback dati e sul suo ambiente di archiviazione e utilizzo, consultare il manuale utente del fabbricante Dusun.

Si prega di leggere attentamente il manuale per garantire l'uso del dispositivo nelle migliori condizioni e in modo sicuro.

Uso previsto

Il terminale di feedback dati è progettato per inviare un feedback di dati dei pazienti che indossano i dispositivi Bora band® alla piattaforma di tele sorveglianza Bora connect®.

In caso di problemi, contattare il proprio fornitore di assistenza domiciliare.

Messa in servizio del terminale


⚠ L'installazione del terminale deve essere effettuata sotto la responsabilità del fornitore di assistenza domiciliare.

1 Collegare il cavo del terminale all'adattatore di alimentazione.


⚠ Usare solo l'adattatore fornito con il terminale.

2 Collegare l'adattatore a una presa di corrente.

⚠ Per funzionare, il terminale deve rimanere sempre collegato alla presa.

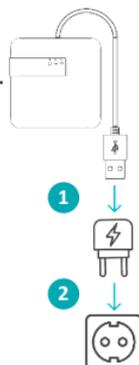


Dopo il collegamento, la prima spia si accende verde.

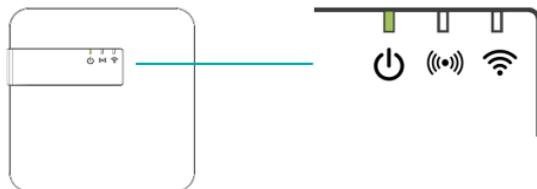


Codice colore delle spie

	Verde fisso: terminale acceso Verde lampeggiante: modalità manutenzione
	Rosso fisso: nessuna connessione alla rete Rosso lampeggiante: ricerca rete in corso
	Blu fisso: connessione a un dispositivo Bora band® Blu lampeggiante: scambio dati in corso

Di seguito si riportano alcuni esempi di combinazioni di spie:

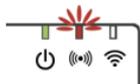

Spia verde accesa e spia rossa lampeggiante: il terminale è acceso e connesso a internet e a un dispositivo Bora band®.

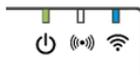

Spia verde accesa e spia blu fissa: il terminale è acceso, connesso a internet e a un dispositivo Bora band®, che scambia dati con il terminale.



Spia verde accesa e spia blu lampeggiante: il terminale è acceso e connesso a internet. Un dispositivo Bora band® è collegato e scambia dati con il terminale.



Il terminale può essere connesso al dispositivo Bora band® (spia blu fissa), ma non alla rete (spia rossa fissa).

Sicurezza informatica

Il presente capitolo fornisce una serie di precauzioni e avvertenze da seguire per proteggersi dai rischi relativi alla sicurezza informatica. Al fine di garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza dei propri dati personali, si consiglia vivamente di leggere attentamente le informazioni di seguito riportate. Per ulteriori informazioni, si invita a consultare la pagina accessibile al seguente link, che descrive la gestione della sicurezza della piattaforma: <https://doc.bora-connect.com/security-description-BC/en>

Rischio informatico

L'NGD Firmware è per sua natura esposto ad attacchi di tipo Denial of Service che possono impedirne il normale funzionamento. Ciò non pregiudica la sicurezza dei dati, ma può impedirne la corretta trasmissione.

In caso si sospetti un attacco, avvisare immediatamente un rappresentante commerciale.

Connessione internet

L'NGD Firmware comunica tramite rete cellulare (4G/5G), WiFi o Ethernet.

Per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, occorre utilizzare una connessione internet protetta da un protocollo di tipo WPA2 o superiore.

Etichettatura e simboli

I simboli utilizzati sul prodotto o sulla relativa confezione sono i seguenti:

	Consultare il manuale dell'utente.
	Nessun allarme.
	Marcatura CE che indica la conformità alla normativa sui dispositivi medici.
	Dispositivo medico.
	Identificativo univoco del dispositivo.
	Fabbricante e data di fabbricazione.
	Nome e indirizzo della succursale registrata del mandatario svizzero.

L'etichettatura del software associato al terminale di feedback dati è la seguente. Per conoscere l'ultima versione del software, rivolgersi al proprio fornitore.

	Bora NGD Firmware				
	BIOENCY 13 rue Claude Chappe Bât-A Oxygène 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, Francia		(01)03770024064087 (8012)vx.y.z		Obelis Swiss GmbH Ruessenstrasse 12, 6340 Baar / ZG, Svizzera
					

BIOSENCY

Caring anytime, anywhere

Informazioni di contatto del fabbricante



Biosency

13 rue Claude Chappe – Bât A Oxygène

35510 Cesson Sévigné

support@biosency.com