

BIOSENCY

Caring anytime, anywhere



CE 2797

Bora NGD Firmware (Network Gateway Device)

NGD_IFU_PT_1.2

Março de 2025

Sumário

Introdução	3
Sobre este manual	3
Utilização prevista	3
Colocação em funcionamento do terminal	4
Código de cores dos indicadores luminosos	5
Cibersegurança	6
Risco informático	6
Conexão à Internet	6
Etiquetagem e símbolos	7
Informações de contacto do fabricante	8

Introdução

Sobre este manual

Este manual é o guia do utilizador para o terminal de retorno de dados fornecido pela Biosency. O Bora NGD Firmware refere-se ao software incorporado no terminal de retorno de dados. Apenas o software é um dispositivo médico.

O terminal só pode ser utilizado com acessórios fornecidos pela Biosency. Para mais informações sobre o terminal de retorno de dados e o seu ambiente de armazenamento e utilização, consulte o manual do utilizador do fabricante Dusun.

Leia atentamente estas instruções para garantir que o aparelho é utilizado em condições ótimas e sem riscos.

Utilização prevista

O terminal de retorno de dados foi concebido para transmitir os dados dos pacientes que usam dispositivos Bora band® para a plataforma de monitorização remota Bora connect®.

Se ocorrer algum problema contacte o seu prestador de cuidados de saúde ao domicílio.


Colocação em funcionamento do terminal

⚠ O terminal deve ser instalado sob a responsabilidade do seu prestador de cuidados domiciliários.

- 1 Ligar o cabo do terminal ao adaptador de carregamento.
⚠ Utilizar apenas o adaptador fornecido com o terminal.
- 2 Em seguida, ligar o adaptador a uma tomada elétrica.
⚠ O terminal deve de estar ligado continuamente para funcionar.




Uma vez ligado à corrente, a luz verde acende-se no primeiro indicador luminoso.

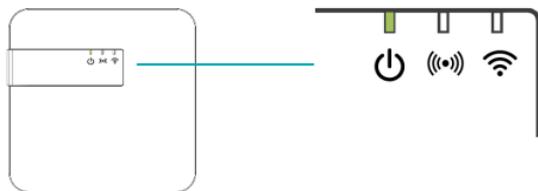


Código de cores dos indicadores luminosos

	Verde fixo: terminal ligado Verde intermitente: modo de manutenção
	Vermelho fixo: sem conexão de rede Vermelho intermitente: pesquisa de rede
	Azul fixo: conexão a uma Bora band® Azul intermitente: troca de dados


Eis alguns exemplos de combinações dos indicadores:

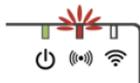


Luz verde acesa e luz vermelha intermitente: o terminal está ligado e à procura da sua rede de Internet.

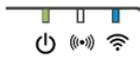

Luz verde acesa e luz azul fixa: o terminal está ligado, conectado à Internet e a um dispositivo Bora band®.

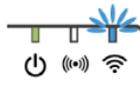

Luz verde acesa e luz azul intermitente: o terminal está ligado e conectado à Internet. Está ligado um dispositivo Bora band® e efetua a troca de dados com o terminal.

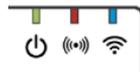

O terminal pode estar ligado ao dispositivo Bora band® (luz azul fixa) mas não à rede elétrica (luz vermelha fixa).

Cibersegurança

Este capítulo apresenta um conjunto de precauções e avisos para evitar os riscos de cibersegurança. Para garantir a confidencialidade, integridade e segurança dos seus dados pessoais, aconselhamo-lo vivamente a ler as informações que se seguem. Para obter mais informações, convidamo-lo a consultar a página que descreve a gestão da segurança da nossa plataforma: <https://doc.bora-connect.com/security-description-BC/en>

Risco informático

O NGD Firmware está inerentemente exposto a ataques de tipo negação de serviço que podem impedir o seu funcionamento normal. No entanto, esta situação embora não afete a segurança dos seus dados, pode impedir que sejam transmitidos corretamente.

Em caso de suspeita, contacte imediatamente um representante comercial.

Conexão à Internet

O NGD Firmware comunica através de uma rede celular (4G/5G), WIFI ou Ethernet. Utilize uma conexão à Internet protegida, pelo menos, por WPA2 para garantir a segurança e a confidencialidade dos seus dados.

Etiquetagem e símbolos

Os símbolos utilizados no produto ou na sua embalagem são os seguintes:

	Por favor, consulte o manual do utilizador.
	Não foi acionado nenhum alarme.
	Marcação CE que indica a conformidade com os regulamentos relativos a dispositivos médicos.
	Dispositivo médico.
	Identificador único para o dispositivo.
	Fabricante e data de fabrico.
	Nome e endereço da sucursal registada do representante suíço.

O software associado ao terminal de retorno de dados está identificado da seguinte forma. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter a versão mais recente do software.

	Bora NGD Firmware				
	BIOSENCY 13 rue Claude Chappe Bât-A Oxygène 35510 CESSON-SEVIGNE, França		(01)03770024064087 (8012)vx.y.z		Obelis Swiss GmbH Ruessenstrasse 12, 6340 Baar / ZG, Suíça
					

BIOSENCY

Caring anytime, anywhere

Informações de contacto do fabricante



Biosency

13 rue Claude Chappe – Bât A Oxygène

35510 Cesson Sévigné

support@biosency.com